

最短わずか 5分!!

新型コロナウイルスを 自宅で簡単チェック!!

抗原検査

唾液検査

安心のCE認証



保管及び安定性

- 本検査キットは湿気および熱に敏感なため、2~30°Cの直射日光が当たらないところに保管してください。
- 開封後は、すぐに検査を行ってください。検査カードは1時間以内にできるだけ早く使用してください。
- 冷凍保存をしないでください。

注意事項

- 本キットは疫学調査などの試験研究を目的とするものであり、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべき商品ではありません。
- ご使用前に説明書をよくお読みいただき手順を厳守してください。不正確な結果が出る可能性がございます。
- 使用期限切れになった検査キットは使用しないでください。
- 一度使用したものを再使用しないで下さい。
- 全ての検査中、使用後の内容物は感染するものとみなし、厳重に取り扱いください。
- 取り扱う際は医療用の手袋などのご使用を推奨されます。本キットの内容物を取り扱う際は適合する保護服および保護具を着用してください。取り扱った後は手をしっかり洗ってください。
- 検体の取り扱いおよびゴミの廃棄は各地域の規定に従って廃棄してください。
- 唾液採取時に血がついたように見える、または過剰に粘り気のある検体の使用を避けてください。
- 異なるロットの商品からの内容物を使用しないでください。
- 試薬液は塩類溶液を含んでいます。水溶液が皮膚または目に触れた場合は水で洗い流してください。
異常が出た場合は眼科・皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

besthree CE

新型コロナウイルス 抗原検査キット(1回分)

研究用

[キット内容]

- 検査キット本体 × 1
- 唾液収集ボトル(キャップ付き) × 1
- 抗原抽出バッファ(検体チューブ、緩衝液、スポイト) × 1
- 日本語 説明書 × 1
- 安全性試験 合格書 × 1

CE 認証済



CE認証は、製品がEUの
安全基準条件を満たす
ことを証明するものです。

商品名	JAN	販売定価 (税抜)	原産国	保存期間	商品サイズ (mm/総重量g)	1c/s 入数 (mm/総重量g)
besthree (ベススリー)		1,280円	中国	製造日より 1年	w150*d26*h68mm 1回分あたり30g	120個入り w530*d230*h290mm 4,450g

※本キットは、疫学調査等のための試験研究を目的とするものであり、疾病等の診断を行うことを目的とするものではないため、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべき商品ではありません。※無断転用不可。販売や広告掲載に際しましては法律を順守して下さい。

bestthree

使用方法

- ① チューブから先端を取り外します。
- ② 唾液収集ボトルを取り出します。
- ③ 唾液収集ボトルのアダプターとチューブをセットします。
- ④ 口内で唾液を出し、咽頭に飲み込んでから唾液を口に戻します。
- ⑤ ④を 5 回繰り返し、唾液を唾液収集ボトルに吐き出します。
- ⑥ 検体チューブの口を取り外します。
- ⑦ 抗原抽出バッファを指で折り、全ての溶液(約 300 μL)を検体チューブに絞り出します。
- ⑧ 唾液収集ボトルからスポイドで唾液を吸い取り、検体チューブに 6 滴(約 180 μL)の加えます。
 スポイドの先端を液体に付け、10 回プッシュして唾液と緩衝液を馴染ませてください。
- ⑨ 検体チューブの口を取り付けます。

検査手順

検査前に説明書をよく読み、正確に検査を完了してください。
不正確な結果が出る可能性がございます。

- ① 検査キット本体を取り出し、清潔な平面に置きます。
- ② 検体チューブで抽出された水溶液(約 80 μL)を検査キット下部の穴に 3 滴垂らし、
 タイマーで 20 分計ってください。
- ③ 20 分以内に陽性・陰性の結果が表示されます。
 30 分後以降の結果は有効ではありません。

